

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.



### **Cechy charakterystyczne dla wszystkich stetoskopów MDF:**

1. w pełni obrotowy zawór akustyczny
2. ręcznie wykonany
3. program dożywnych części zamiennych
4. ulepszona akustyka
5. oliwki MDF zapewniają doskonałą akustykę i długotrwały komfort pracy
6. precyzyjnie wykonany bardzo wytrzymały
7. materiał przewodu o bardzo dużej gęstości, nie skleja się, nie kruszeje, nie zawiera lateksu
8. nieziębiące obwódki zwiększają wzmocnienie akustyczne i izolację
9. membrana z ultra-czułego włókna wzmacnia dźwięk

### **Informacje ogólne:**

Stetoskopy MDF zostały zaprojektowane jako nieinwazyjne medyczne instrumenty do osłuchiwania serca i odgłosów płuc dokonywanego na zdrowej skórze w okolicach klatki piersiowej. Z uwagi na funkcję wzmacniania dźwięków, stetoskop może spowodować uszkodzenie słuchu użytkownika, jeżeli jest używany w innym niż medyczny celu. Nie pozostawiaj stetoskopu bez nadzoru w zasięgu dzieci.

Warunki ogólne użytkowania: Lira stetoskopów MDF jest anatomicznie dopasowana, aby zapewnić komfort użytkowania i doskonałą transmisję dźwięków. Lira stetoskopu powinna być zakładana oliwkami skierowanymi od siebie (jeżeli trzymasz stetoskop przed sobą).

### **Instrukcja użytkowania:**

1. Najpierw włóż obie końcówki liry stetoskopu do uszu.
2. Delikatnie dotknij głowicę palcem. Jeżeli słyszysz czysty dźwięk oznacza to, że stetoskop jest gotowy do pracy.
3. Jeżeli nie słyszysz stuknięcia, obróć głowicę o 180 stopni aż będzie słyszalne kliknięcie – wówczas głowica stetoskopu jest we właściwej pozycji (dotyczy stetoskopów dwustronnych).
4. Dotknij palcem jeszcze raz. Będziesz słyszał stuknięcia oznaczające gotowość przyrządu do użycia.
5. Teraz można przystąpić do badania pacjenta.
6. Powtórz w/w czynności przed badaniem następnej klatki piersiowej.

### **Czyszczenie i konserwacja:**

Stetoskop powinien zostać dokładnie wyczyszczony przed każdym użyciem. Głowicę, przewód i oliwki czyść czystą ściereczką lub użyj waciku zamoczonego w skażonym alkoholu lub w roztworze alkoholu izopropylowego, aby doczyścić zabrudzone elementy. Unikaj długotrwałej ekspozycji przewodu na nadmierne ciepło, zimno, rozpuszczalniki, wilgoć oraz oleje/tłuszcze (ukryte w ludzkiej skórze).

**Szanowni Państwo, z dniem 10.08.2012 uległy zmianie warunki gwarancji stetoskopów MDF Instruments. W związku z tym niniejsza karta gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi w całości zastępuje kartę gwarancyjną Stetoskopy MDF dostarczaną fabrycznie w opakowaniu.**

## Kartagwarancyjna

- Urządzenie objęte jest dożywotnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji. Wyjątek stanowią modele stetoskopów: MDF 740, 757PT Pulse Time, które objęte są 5 letnią gwarancją.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje zużycia w wyniku naturalnej eksploatacji następujących elementów stetoskopu: korpusu głowicy, przewodu akustycznego i liry.
- Następujące części eksploatacyjne i akcesoria stetoskopu objęte są programem Free-Parts-for-Life (dożywotnia wymiana części zamiennych): nieziębiąca obwódka głowicy, pierścień podtrzymujący membranę, membrana, identyfikator, miękkie oliwki ComfortSeal
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub przez formularz [www.novamed.pl/reklamacja](http://www.novamed.pl/reklamacja)
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.
- 
- **UWAGA:** Dowiedz się więcej o programie dożywotniej gwarancji.
- Free-Life-Time-Warranty oraz o programie dożywotniej wymiany części zamiennych Free-Parts-for-Life z załączonej karty PROGRAMY SERWISOWE MDF

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
GWARANCJA	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	

**Producent:**

MDF Instruments Direct, Inc.  
5016 Chesebro Road Suite 100  
Agoura Hills CA, 91301  
USA

**Dystrybutor w Polsce:**

Novamed Sp. z o.o.  
Traktorowa 143  
91-203 Łódź  
[www.novamed.pl](http://www.novamed.pl)

Data utworzenia instrukcji: 01.04.2013